

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer 設置報告書



株式会社IHシバウラ

機械事業本部 営業サービス部

〒704-8122岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL(086)944-6528FAX(086)942-9030

NO. 779078

お客様	名称 (築城歯科医院) ついき歯科クリニック	製造番号 100199	ご確認 築城
	住所、TEL 〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 長崎市香島町3-6-3F	納入日 2017. 4. 5	
モリタ・営業所・担当TEL 担当 株式会社モリタ 長崎営業所 095-849-1620		納入検査・会社・実地名 エムシーサービス(株) 北九州SC 久岡	

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	✓	開閉動作確認	外装・設置	✓	本体の水平確認・基準傾き内
	✓	ドアパッキンキズ・汚れ点検		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	キズ・汚れ
	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	ドア開放スイッチON時の開放状態	制御	✓	運転プログラムの確認
洗剤ポンプ	✓	洗剤レベルセンサ配線、配管取付		✓	入力・出力確認
	✓	洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ	性能評価	✓	インジケーターによる残渣判定(TOSI)
	✓	洗剤投入量の確認			
	✓	ローラーポンプの動作確認			
給排水	✓	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	その他	✓	付属品の確認
	✓	ジョイントLの取付状態、水漏れ 50HZ		✓	運転説明
				✓	装置内運転時異音・振動
電装系	✓	電源スイッチの作動状態	運転検査結果		TOSI
	✓	SDソケットの反応・汚れ	良好		
	✓	行程表示窓内LEDの点灯			
	✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ			

備考	数量



株式会社エムシーサービス

機械事業本部 営業サービス部

〒704-8122

岡山県岡山市東区西大寺新地170番1

TEL 086-944-6528

FAX 086-942-9030



クラスBオートクレーブ IC Clave 設置報告書

シバウ用

お客様	名称 ついで歯科クリニック (築城歯科医院)	製造番号 100217	ご確認	築城
	住所 長崎市西島町3-6-3F 様島	納入検査実施日 2017.2.17 4.5.		
		納入検査実施者 エムシーサービス(株) 北九州SO 久岡		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア・パッキン	✓	ハンドル開閉検出確認	電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	ディスプレイの色あせ・表示確認
	✓	ドアパネル・ハンドルのキズ・汚れ		✓	電源スイッチの作動状態
	✓	ハンドルキズ・汚れ		✓	SDカードの挿入・取外性
缶体	✓	割れ・キズ・腐食・汚れの有無	外装・設置	✓	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと
	✓	滅菌温度センサの汚れ		✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
	✓	棚 1、トレイ 3キズ・汚れ		✓	本体の水平確認 設置時ガタツキがないこと。
	✓	缶内フィルタのキズ・汚れ・取外・取付性		✓	アジャスタフット・ナットの緩み・設置状態
給水タンク	✓	給水タンクの内部汚れ	制御	✓	キズ・汚れ
	✓	水フィルタキズ・汚れ・取外・取付性		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	ゴム蓋の取付状態 機械室に水が入らない蓋の取付取外しに問題が無いか		✓	運転プログラムの確認(規定滅菌温度・時間)
	✓	装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと)		✓	タッチパネル表示確認・履歴の確認
	✓	LOW(水切)/High(満水)フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致	性能評価	✓	B&Dテスト実施
排水タンク	✓	タンク内に汚れはないか		✓	リークチェックテスト
	✓	フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致		✓	0点調整
	✓	装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと)	その他	✓	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付
スペース	✓	設置スペースの確保 右90×左50×背面75×天面250mm以上 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと		✓	運転・お手入れ方法の説明
				✓	装置内運転時異音

特記事項