

③ 作業報告書

登録	大串産科医院			様	ご承認印
住所	長崎県佐世保市日守町678-3				
TEL	0956-34-2063	番			
標識名	ソックス・ディスペンサー	メーカー	モリタ(モリタ)		
型式	IC Washer	(号機)	製番	700225	
完了	継続	有料	無料	運送価格	7873(4625)円

ご依頼内容・現象

定期点検

(ご依頼者 様)

原因

処置

☒ 部品交換（右記部品一覧を参照して下さい）		
☒ 各部増締め	☐ 分解・再セットアップ	☒ 各部清掃・
☐ グリスアップ	☒ 動作確認	☒ 設定・プログラムの確認
☒ 点検表に基づく点検整備（別紙点検表を参照して下さい）		
☐ 性能検査立ち会い	☒ 試運転	☒ 最終検査終了・異常なし

お客様への伝言

作業日 20: 20 年 01 月 07 日

守態 1 保守 2 性校 3 性校 4 点校 5 点校 9 封校 (摘要)

サード
ス形態

1 保守 期間	2 除 リ ット	3 CMC
---------------	------------------------------	----------

医療
機器

3

区分

博 覧 管	非 博 覧 管
-------------	------------------

作 業 分 区	00 品販	10 納入	11 現地	20 定調	30 性能	40 点検	50 コル	60 撤去
	70 PR	72 取説	73 改造	74 部組	75 下見	77 FC	80 アウ	90 その他

受 付 月 日 時 分
到着時間 月 日 時 分
作業完了時 月 日 時 分

コ	ー	ド	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
			ドアパッキン一式	1		
			洗剤ポンプチューブ	2		
			ポリフィルター	1		
			HEPAフィルター	1		
			上段スポンジボックス	1		

1	基本・据付・ <u>点検</u> 性検 -	(見積書No.	)	30,000
2	技術料	H ×	名 ×	円
3	派遣料	往復 340km ×	1 名 ×	100 円
4	宿泊費	1 泊 ×	1 名 ×	12,000 円
5	諸経費	診療終了後追加		
6		前送料金		

サウビスセンター	北九州 TEL	実施者 久岡
----------	------------	-----------

責任技術者	検印	入力	新品書

取投案者 (請求先)

IHIAグリテック

(支店名)

(ご担当者)

(注文№.)

管理No. 821298

左記作業をおこないましたので、ご
検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、

上欄の管理№.にてお問い合わせ下さい。

医療機器の修理・点検（医療機器修理業許可取得）・販売

 エムシーサービス株式会社

T 387-0013 長野県千曲市小島3171-5
TEL 026-279-0720 FAX 026-279-4074

札幌SC	仙台SC	つくばSC
秋田SC	松本SC	千葉SC
仙台SC	金沢SC	埼玉SC
横浜SC	北海道SC	福岡SC
新潟SC	神奈川SC	大阪SC

神奈川 SC	大野 SC	市川 SC
市川 SC	市川 SC	市川 SC
市川 SC	市川 SC	市川 SC
市川 SC	市川 SC	市川 SC
市川 SC	市川 SC	市川 SC

洗淨・滅菌業務委託・医療機器等洗淨・滅菌テスト

M 滅菌センター

〒386-0002 長野県上田市住吉280-8
TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250

高社用具レンタル・販売・住宅リフォーム

CARE メディカルケア株式会社

TEL 028-273-4115 FAX 026-273-4115

科 金 內 訊

⑬ A

部品代			
-----	--	--	--

⑭ B	技术科等	88-002
-----	------	--------

15			
----	--	--	--

税引合正金額	88,000
--------	--------

消費税	8800
-----	------

ご請求金額 ¥	96	800
---------	----	-----

納品書	
-----	--

器具除染用洗浄機 IC Washer点検報告書

モリタ用
作業書用
IHアグリテック用

お客様	名称	大串歯科医院	様	製造番号	100225	点検 実施日	2020. 1. 7	1 承認 印	
	住所	長崎県佐世保市日宇町678-3		運転回数	1873 (4625)		点検 実施者		IHS-サービス 岡北九州SC 久岡
	納入場所			サービス形態			モリタ 担当者		

ドア機能

- ☒ ドア開閉動作
- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ ドアフックの掛かり・押付け強さ
- ☒ ドア締め付けスイッチの作動
- ☒ インターロックの作動
- ☒ テンションスプリングの取付け・伸び
- ☒ ドアパネルの取付け・キズ
- ☒ ドアヒンジの動作
- ☒ ドア手動開放レバーの作動
- ☒ ドア開放スイッチONの際の開放量

薬剤ポンプ(洗剤・仕上剤)

- ☒ 薬剤レベルセンサー配線・配管取付
- ☒ 薬剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ☒ ポンプチューブの潰れ・漏れ
- ☒ ローラーポンプの作動
- ☒ 薬剤投入量
- ☒ 薬剤レベルセンサーの作動

乾燥ユニット

- ☒ 乾燥ファンの取付け
- ☒ 乾燥ファンの作動・異音
- ☒ 乾燥ヒータの取付け状態・配線の劣化
- ☒ 乾燥ヒータの作動
- ☒ プレフィルタのつまり・汚れ
- ☒ HEPAフィルタのつまり・汚れ

配管系

- ☒ 外部給水・給湯配管の継手・ホースの損傷・漏れ
- ☒ 外部排水継手・ホースの損傷・漏れ
- ☒ 給水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 排水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 循環回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 乾燥回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 給水弁の作動・漏れ
- ☒ 給湯弁の作動・漏れ
- ☒ 水位圧力スイッチの取付け・漏れ
- ☒ 給水タンク・凝縮タンクの取付け・漏れ

ポンプ

- ☒ 循環ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 循環ポンプの作動・異音
- ☒ 防振ゴムの取り付け・劣化
- ☒ 排水ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 排水ポンプの作動・異音
- ☒ 凝縮排水ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 凝縮排水ポンプの作動・異音

洗浄槽

- ☒ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れ
- ☒ 槽内LEDの点灯
- ☒ 洗浄アームの回転
- ☒ 洗浄アームの変形・損傷・つまり清掃
- ☒ ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ
- ☒ 排水口フィルタの汚れ・詰まり
- ☒ 加温ヒータの汚れ・損傷・変形
- ☒ ヒータ過昇防止器の取付け・汚れ

電気系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示
- ☒ 電源スイッチの作動
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接点
- ☒ メモリーカードへの書き込み確認
- ☒ 圧力センサーの取付け
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色(加温・乾燥)

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの固定・ゴムシートの設置
- ☒ 外装の汚れ・損傷
- ☒ 制御パネルカバーの汚れ・損傷

消耗品の交換

- ☒ ドアパッキン
- ☒ プレフィルタ
- ☒ HEPAフィルタ
- ☒ 洗剤・仕上剤ポンプチューブ

性能評価

- ☒ インジケータによる残渣判定(TOSI)

運転確認

合 ・ 否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品	数量
ドアパッキン一式、プレフィルタ、HEPAフィルタ	各1
洗剤ポンプチューブ	2
上段ラックゴムブッシュ	1

株式会社IHアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒804-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030