

0009/0013

ILMシーラー

2020 01/27 22:38 FAX 0932845501

C 作業報告書

お名前	喜多歯科医院		様	ご承認印
住所	長崎県島原市中町796			
TEL	0957-62-4745	署名		
機種名	シャワー・ディスク・ワッシャー	メーカー	Eiyu (IHアクリック)	
型式	IC Washer (号機)	製造番号	100237	
完了	継続	有料	無料	1412 回

ご依頼内容・現象
IC Washer 点検作業

(ご依頼者 様)

処置
☒ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
☒ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☒ 各部清掃
☒ グリスアップ ☒ 動作確認 ☒ 設定・プログラムの確認
☒ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☒ 最終検査終了・異常なし

お客様への伝言

作業日 20 20 年 01 月 23 日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 点検	5 点検	9 点検
サービス形態	1 保守期間	2 スキム	3 CM	医療機器	3	区分
作業区分	01 製品販売	10 納入設置	11 現地調査	20 定期点検	30 性能検査	40 コール
	70 PR	72 取扱説明書	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 3C
						80 アフター
						90 その他

受付 月 日 時 分
到着時間 月 日 時 分
作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	トリアキニー式	1		
	洗剤ポンプ	2		
	ポリフィルター	1		
	HEPAフィルター	1		

1	基本・梱付 (点検) 注検	(見積書No.)	30,000
2	技術料 H× 名× 円		
3	派遣料 往復 460km 名× 円 高速金		55,000
4	宿泊費 泊× 名× 円		
5	諸経費		3,000
6			

責任技術者 北九州 久岡
TEL 093-4791-5218

取扱業者 (請求先)
IHアクリック
(支店名)
(ご担当者)
(注文No.)

管理No. 821297
左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。
なお、不明な点がございましたら、上欄の管理No.にてお問い合わせ下さい。

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

M エムシーサービス株式会社
〒387-0013 長野県千曲市小島3171-5
TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074

洗淨・滅菌業務委託・医療機器等洗淨・滅菌テスト
M 滅菌センター
〒098-0002 長野県上田市夜宮280-8
TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250

福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム
VORE メディカルケア株式会社
〒887-0013 長野県千曲市小島3172
TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

料 金 内 訳	
⑬ A	部品代
⑭ B	技術料等 88,000
⑮	
⑯	
⑰	税別合計金額 88,000
⑱	消費税 8,800
ご請求金額 ¥ 96,800	
納品書 No.	

IM-302

器具除染用洗浄機 IC Washer点検報告書

ヤリタ用
検査用
IHアグリテック用

お客様	名称	喜多歯科医院	様	製造番号	700237	点検 実施日	2020. 1. 23	承認 印
	住所	長崎県島原市中町796		運転回数	1412	点検 実施者	IMサービス部北九州SC 久岡	
	納入場所			サービス形態		モリタ 担当		

ドア機能

- ☒ ドア開閉動作
- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ ドアフックの掛かり・押付け強さ
- ☒ ドア締め付けスイッチの作動
- ☒ インターロックの作動
- ☒ テンションスプリングの取付け・伸び
- ☒ ドアパネルの取付け・キズ
- ☒ ドアヒンジの動作
- ☒ ドア手動開放レバーの作動
- ☒ ドア開放スイッチONの際の開放量

薬剤ポンプ(洗剤・仕上剤)

- ☒ 薬剤レベルセンサー配線、配管取付
- ☒ 薬剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ☒ ポンプチューブの潰れ・漏れ
- ☒ ローラーポンプの作動
- ☒ 薬剤投入量
- ☒ 薬剤レベルセンサーの作動

乾燥ユニット

- ☒ 乾燥ファンの取付け
- ☒ 乾燥ファンの作動・異音
- ☒ 乾燥ヒータの取付け状態・配線の劣化
- ☒ 乾燥ヒータの作動
- ☒ プレフィルタのつまり・汚れ
- ☒ HEPAフィルタのつまり・汚れ

配管系

- ☒ 外部給水・給湯配管の継手・ホースの損傷、漏れ
- ☒ 外部排水継手・ホースの損傷、漏れ
- ☒ 給水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 排水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 循環回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 乾燥回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 給水井の作動・漏れ
- ☒ 給湯弁の作動・漏れ
- ☒ 水位圧カススイッチの取付け・漏れ
- ☒ 給水タンク・凝縮タンクの取付け・漏れ

ポンプ

- ☒ 循環ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 循環ポンプの作動・異音
- ☒ 防振ゴムの取り付け・劣化
- ☒ 排水ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 排水ポンプの作動・異音
- ☒ 凝縮排水ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 凝縮排水ポンプの作動・異音

洗浄槽

- ☒ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れ
- ☒ 槽内LEDの点灯
- ☒ 洗浄アームの回転
- ☒ 洗浄アームの変形・損傷・つまり清掃
- ☒ ラック接続ゴムブッシュのへたり・漏れ
- ☒ 排水口フィルタの汚れ・詰まり
- ☒ 加温ヒータの汚れ・損傷・変形
- ☒ ヒータ過昇防止器の取付け・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示
- ☒ 電源スイッチの作動
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続
- ☒ メモリーカードへの書き込み確認
- ☒ 圧力センサーの取付け
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色(加温・乾燥)

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの固定・ゴムシートの設置
- ☒ 外装の汚れ・損傷
- ☒ 制御パネルカバーの汚れ・損傷

消耗品の交換

- ☒ ドアパッキン
- ☒ プレフィルタ
- ☒ HEPAフィルタ
- ☒ 洗剤・仕上剤ポンプチューブ

性能評価

- ☒ インジケータによる残液判定(TOSI)

運転確認

合 - 否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品	数量
ドアパッキン一式、プレフィルタ、HEPAフィルタ	各1
洗剤ポンプチューブ	2

株式会社IHアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒804-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-8030