

お客様	名称	スマイル歯科	製造番号	13100077	点検実施日	2021. 1. 12	ご承認印
	住所	佐賀市北川副町江上95-1	運転回数	2195 (1093)	点検実施者	エムシーサービス(株) 北九州SC 久岡	
	納入場所		サービス形態		モリタ担当部署		

計装(安全)

☒	圧力計0点指示誤差
ドア	
☒	フック検出スイッチの取り付け状態・動作確認
☒	開閉ハンドル取り付け状態・動作確認
☒	フック取り付け状態・動作確認
☒	フックバネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
☒	ビス・ナット・ホーローセット増し締め
☒	ドアカバーの取り付け状態・割れ
☒	フック検出ユニット動作確認
☒	ドアロックユニット動作確認
☒	蓋板のキズ・汚れ
☒	開閉ハンドルの損傷確認

缶体

✓	割れ・キズ・腐食・汚れの有無
✓	減菌温度センサの汚れ
✓	網カゴの破損、汚れ
✓	缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系

✓	フッソ樹脂チューブ・継手の損傷、漏れ
✓	シリコンチューブ・継手の損傷、漏れ
✓	給気弁の作動状態・漏れ
✓	排蒸弁の作動状態・漏れ
✓	真空・乾燥弁の作動状態・漏れ
✓	滅菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
✓	ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
✓	ストレーナーの汚れ
✓	排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
✓	安全弁(滅菌室)の漏れ
✓	安全弁(蒸気発生器)の漏れ
✓	ダンプナーの漏れ・溶接割れ
✓	大気圧検知圧カスイツの作動状態・漏れ
✓	ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸氣發生器

✓	ソケット他溶接割れ・漏れ
✓	フランジパッキン漏れ
✓	ヒーター取り付け状態・漏れ
✓	空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
✓	電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
✓	逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

✓	水漏れ・異常音の確認
✓	真空到達度

給水タンク

- ☒ 給水タンクの損傷・漏れ
- ☒ 下部給水弁の漏れ
- ☒ 蓋・取っ手の損傷・割れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

☒ タンクの汚れ・漏れ
☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
✓	ディスプレイの色あせ・表示確認
✓	電源スイッチの作動状態
✓	行程表示LEDの点灯
✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
✓	各基板のコネクター緩み確認
✓	端子の緩み・コネクターの接続確認
✓	配線の変色・損傷有無・結束状態
✓	圧力センサーの取付け状態・入力確認
✓	ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

✓	本体の水平確認・基準傾き内
✓	アジャスタフットの緩み・設置状態
✓	キズ・汚れ
✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制衡

✓	運転プログラムの確認
✓	入力・出力確認
✓	試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

✓	ドアバッキンの損傷・劣化・汚れ
✓	エアーフィルターのつまり、汚れ

性能評價

✓	B&Dテスト実施
✓	ケミカルインジケータによる判定
✓	リークチェック
✓	キャリブレーションの実施(温度・圧力)

インジケータ貼り付け

運転確認

合 . 否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
	

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL: 086-944-6528

FAX: 086-942-9030