

小型 全自動洗浄消毒装置 WD-150点検表

名称 おく小児矯正歯科	検査番号 14070127	点検実施日 2016年4月26日	承認印 本田
住所 鹿児島市田上5-4-27	運転時間	点検実施者 船月 久岡	
納入場所	サービス 定期・保守・フルメンテ	モリタ検査部	

ドア機能

1	2	✓	開閉動作確認
1	2	✗	ドアバック目視点検
1	2	✓	ドアフックの掛かり・締め付け確認
1	2	✓	ドア締め付けスイッチ作動確認
1	2	✓	インターロック動作確認
1	2	✓	テンションスプリングの取付け状態・伸び
1	2	✓	ドアパネルの取付け状態・キズ
1	2	✓	ドアヒンジの動作・グリスアップ
1	2	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認
1	2	✓	ドア開放スイッチON時の開放状態

洗剤ポンプ

1	2	✓	洗剤レベルセンサ配線、配管取付
1	2	✓	洗剤ホースの折れ・曲がり・経手手の漏れ
1	2	✗	ポンプチューブの潰れ・漏れ
1	2	✓	ローラーポンプの動作確認
1	2	✓	流量計の検出状態
1	2	✓	洗剤投入量の確認
1	2	✓	洗剤レベルセンサーの作動確認

乾燥ユニット

/	2	✓	乾燥ファンの取付け状態
1	2	✓	乾燥ファンの作動状態・異音・電流値
1	2	✓	乾燥ヒーターの取付け状態・配線の劣化
1	2	✗	プレフィルターの汚れ
/	2	✗	メインフィルターの汚れ(HEPAフィルター)

配管系

1	2	✓	ストレーナーの清掃(給水・給湯)
1	2	✓	外部給水・給湯配管の経手の損傷・漏れ
1	2	✓	外部排水経手・ホースの漏れ
1	2	✓	給水回路配管(ホース)の取付け状態・漏れ
1	2	✓	排水回路配管(ホース)の取付け状態・漏れ
1	2	✓	循環回路配管(ホース)の取付け状態・漏れ
1	2	✓	給水弁の作動状態・漏れ
1	2	✓	給湯弁の作動状態・漏れ
/	/	✓	RO水弁の作動状態・漏れ
1	2	✓	水位圧力スイッチ・センサーの取付け状態・漏れ
1	2	✓	給水タンクの取付け状態・漏れ
1	2	✓	排水タンクの取付け状態・漏れ
1	2	✓	凝結水の取付け状態・漏れ
1	2	✓	乾燥エア回路逆止弁の作動状態・漏れ

ポンプ

1	2	✓	循環ポンプの取付け状態・漏れ
1	2	✗	循環ポンプの作動状態・異音・電流値 (循環ポンプサーマルセット値)
1	2	✓	防護ゴムの取付け状態・劣化
1	2	✓	排水ポンプの取付け状態・漏れ
1	2	✓	排水ポンプの作動状態・異音・電流値

洗浄槽

1	2	✓	キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れの有無
1	2	✓	レールの損傷・変形
1	2	✓	洗浄アームの回転確認・ベアリング磨耗状態
1	2	✓	洗浄アームの変形・損傷確認・つまり清掃
1	2	✓	ラック接続ゴムブッシュのへたり・漏れ
1	2	✓	排水口フィルターの汚れ・詰まり
1	2	✓	加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
1	2	✓	ヒーター過昇防止継の取付け状態・汚れ

電装系

1	2	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
1	2	✓	ディスプレイの色あせ・表示確認
1	2	✓	電源スイッチの作動状態
1	2	✓	USBソケットの反応・汚れ
1	2	✓	行程表示LEDの点灯
1	2	✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
1	2	✓	各基板のコネクター緩み確認
1	2	✓	端子の緩み・コネクターの接続確認
1	2	✓	配線の変色・損傷有無・結束状態
1	2	✓	圧力センサーの取付け状態・入力確認
1	2	✓	ヒーター配線の緩み・変色有無(加温・乾燥)

外装・設置

1	2	✓	本体の水平確認・基準線を内
1	2	✓	アジャスタフットの緩み・設置状態
1	2	✓	キズ・汚れ
1	2	✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

1	2	✓	運転プログラムの確認
1	2	✓	入力・出力確認

消耗品

1	2	✗	ドアバックの損傷・劣化・汚れ
/	2	✗	エアフィルター(プレ)のつまり・汚れ
/	2	✗	エアフィルター(メイン)のつまり・汚れ

性能評価

1	2	✓	インジケータによる残渣判定(TOSI)
S	S	✓	疑似汚れによる残留タンパク質の残渣判定(ATP)
1	2	✓	キャリブレーションの実施(温度・圧力)
1	2	✓	洗剤キャリブレーションの実施

異常なし	調整	修理	分解	磨付け	交換	清掃	給油	整備	要交換
✓	A	△	W	T	X	G	L	M	◎

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
ポンプチューブ (320, 150)	2
ドアバック式	1
プレフィルター	1
メインフィルター	1
(洗剤ポンプ) メーカー交換品	(1)

備考(ご提案)

1	2	✓	槽内温度センサーの取り付け状態・汚れ
1	2	✓	槽内LEDが各工種色で点灯している
1	2	✓	洗浄槽、ドア内槽掃・拭掃除、ゴミ取り
S	S	✓	薬剤を使用しての掃除