

小型 全自動洗浄消毒装置 WD-150点検表

名称 おく小児矯正歯科医院	製造番号 14070127	点検実施日 2017.6.13	二重印 藤原
	住所 鹿児島市田上5-4-27	運転時間 4294回 サービスマン 定期・保守・フルメンテ	

ドア機能

- 開閉動作確認
- ドアバッキン目視点検
- ドアフックの掛かり・締め付け量確認
- ドア締め付けスイッチ作動確認
- インターロック動作確認
- テンションスプリングの取付け状態・伸び
- ドアパネルの取付け状態・キズ
- ドアヒンジの動作
- ドア緊急時開放スイッチ機構確認
- ドア開放スイッチON時の開放状態

洗浄ポンプ

- 洗剤レベルセンサ配線、配管取付
- 洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の濡れ
- ① ポンプチューブの濡れ・濡れ (ミル7用チューブ同い)
- ローラーポンプの動作確認
- 流量計の検出状態
- 洗剤投入の確認
- 洗剤レベルセンサーの作動確認

乾燥ユニット

- 乾燥ファンの取り付け状態
- 乾燥ファンの作動状態・異音
- 乾燥ヒーターの取り付け状態・配線の劣化
- プレフィルターの汚れ
- メインフィルターの汚れ(HEPAフィルター)

配管系

- ストレーナーの清掃(給水・給湯)
- 外部給水・給湯配管の継手の損傷・濡れ
- 外部排水継ぎ手・ホースの濡れ
- 給水回路配管(ホース)の取り付け状態・濡れ
- 排水回路配管(ホース)の取り付け状態・濡れ
- 循環回路配管(ホース)の取り付け状態・濡れ
- 給水弁の作動状態・濡れ
- 給湯弁の作動状態・濡れ
- RO水弁の作動状態・濡れ
- 水位圧カススイッチ・センサーの取り付け状態・濡れ
- 給水タンクの取り付け状態・濡れ
- 排水タンクの取り付け状態・濡れ
- 凝縮期の取り付け状態・濡れ
- 乾燥エア回路逆支弁の作動状態・濡れ

ポンプ

- 循環ポンプの取り付け状態・濡れ
- 循環ポンプの作動状態・異音
- 防護ゴムの取り付け状態・劣化
- 排水ポンプの取り付け状態・濡れ
- 排水ポンプの作動状態・異音

洗浄槽

- キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れの有無
- 槽内LEDが各工程色で点灯している
- 洗浄アームの回転確認・ベアリング磨耗状態
- 洗浄アームの変形・損傷確認・つまり清掃
- ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・濡れ
- 排水口フィルターの汚れ・つまり
- 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ヒーター過熱防止部の取り付け状態・汚れ

電気系

- タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ディスプレイの色あせ・表示確認
- 電源スイッチの作動状態
- 行程表示LEDの点灯
- 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- 各基板のコネクター緩み確認
- 端子の緩み・コネクターの接続確認
- 配線の変色・損傷有無・結束状態
- 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ヒーター配線の緩み・変色有無(加温・乾燥)

外装・設置

- 本体の水平確認・基準線き内
- アジャスタフットの緩み・設置状態
- キズ・汚れ
- 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

消耗品

- ドアバッキンの損傷・劣化・汚れ
- エアフィルター(プレ)のつまり・汚れ
- エアフィルター(メイン)のつまり・汚れ
- 洗剤ポンプチューブ

性能評価

- インジケータによる残渣判定(TOSI)

運転確認
良好

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は①を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
ポンプ用チューブ	2

株式会社IHシバウラ

機械事業本部営業部 営業部
〒704-8122岡山県岡山市東区大寺新地170-8
TEL 086-944-6528 FAX 086-942-9030