

クラスBオートクレーブ BC-17点検報告書

モリタ用
作業専用
IHIアグリテック用

お客様	名称	おく小児矯正歯科	製造番号	14080159	点検実施	2019・4・18	ご承認印
	住所	鹿児島県鹿児島市市田上5-4-27	運転回数	7817	点検実施	IHIアグリテックサービスGr	
	納入場所	同上	サービス形態		モリタ担当部署		

計装(安全)

- ☐ 圧力計0点指示誤差
- ドア
- ☐ フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認
- ☐ 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
- ☐ フック取付け状態・動作確認
- ☐ フックパネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
- ☐ ビス・ナット・ホーローセット増し締め
- ☐ ドアカバーの取り付け状態・割れ
- ☐ フック検出ユニット作動確認
- ☐ ドアロックユニット作動確認
- ☐ 蓋板のキズ・汚れ
- ☐ 開閉ハンドルの損傷確認

缶体

- ☐ 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- ☐ 滅菌温度センサの汚れ
- ☐ 網カゴの破損・汚れ
- ☐ 缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系

- ☐ フッ素樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ
- ☐ シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ
- ☐ 給気弁の作動状態・漏れ
- ☐ 排蒸弁の作動状態・漏れ
- ☐ 真空・乾燥弁の作動状態・漏れ
- ☐ 滅菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☐ ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☐ ストレーナーの汚れ
- ☐ 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- ☐ 安全弁(滅菌室)の漏れ
- ☐ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ☐ ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- ☐ 大気圧検知圧カスイッチの作動状態・漏れ
- ☐ ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ☐ ソケット他溶接割れ・漏れ
- ☐ フランジパッキン漏れ
- ☐ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ☐ 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- ☐ 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- ☐ 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- ☐ 水漏れ・異常音の確認
- ☐ 真空到達度

給水タンク

- ☐ 給水タンクの損傷・漏れ
- ☐ 下部給水弁の漏れ
- ☐ 蓋・取っ手の損傷・割れ
- ☐ フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

- ☐ タンクの汚れ・漏れ
- ☐ フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

- ☐ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☐ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☐ 電源スイッチの作動状態
- ☐ 行程表示LEDの点灯
- ☐ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☐ 各基板のコネクター緩み確認
- ☐ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☐ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☐ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☐ ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

- ☐ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☐ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☐ キズ・汚れ
- ☐ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- ☐ 運転プログラムの確認
- ☐ 入力・出力確認
- ☐ 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- ☐ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☐ エアフィルターをつまみ・汚れ

性能評価

- ☐ ケミカルインジケータによる判定
- ☐ リークチェック

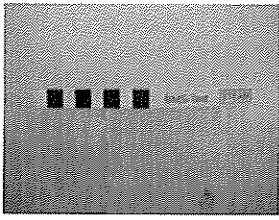
インジケータ貼り付け

【 】

運転確認

合 ・ 否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
	

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030