

C 作業報告書

得意様	やました 歯科 様			ご承認印
住所	鹿児島県薩摩川内市樋通町田比野104-1			シフ
TEL	0996-38-2855 室			
機名	ウォッシャー・ディスペンサー	メーカー	(株)IHIアグリテック	
型式	IC washer (号機)	製番	100395	
完了	継続	有料	無料	1223 国

ご依頼内容・現象

定期点検

(ご依頼者 様)

原因

処置

☒ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)

☐ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃

☐ グリスアップ ☐ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認

☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)

☐ 性能検査立ち会い ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了・異常なし

水漏れ確認 OK

お客様への伝言

作業日 20 21 年 2 月 18 日

保守 1 保守契約 2 点検整備 3 点検整備 4 点検整備 9 対象外 (摘要√)

サービス形態 1 保守期間 2 メンテナンス 3 CM 医療機器 区分 特 非

作業区分 00 製品販売 10 納入設置 11 現地調整 28 定期点検 30 性能検査 40 点検 50 コール 60 撤去設置

70 PR 72 取扱説明 73 改造 74 部品納入 75 下見 77 FC 80 アフター 90 その他

受付 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	HEPAフィルター	1		
	プレフィルター	1		
	洗剤仕上剤 (ボス)	2	支給	
	トパッキン	1式		
	ゴムブッシング	1		
	槽内フィルター	1		

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料	H × 名 × 円	30000
3	派遣料	名 × 円	往復95km 7500
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費		3000
6	高運代		1200

サービスセンター

鹿児島

実施者 黒木

TEL

責任技術者 検印 入力 納品書

取扱業者 (請求先)

(株)IHIアグリテック

(支店名) 岡山事業所

(ご担当者) 小山様

(注文No.)

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

エムシーサービス株式会社

〒387-0013 長野県千曲市小島3171-5
TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074

洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト

滅菌センター

〒386-0002 長野県上田市住吉280-8
TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250

福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム

CARE メディカルケア株式会社

〒387-0013 長野県千曲市小島3172
TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

管理No. 823247

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、上欄の管理No.にてお問い合わせ下さい。

料金内訳

⑬ A

部品代

⑭ B

技術料等

43700

⑮

⑯

税別合計金額

43700

消費税

4370

ご請求金額 ¥

48070

納品書No.

IM-302

器具除染用洗浄機 IC Washer点検報告書

名称	やました歯科	製造番号	100395	点検 実施日	2021. 2. 18	承認印
住所	鹿児島県薩摩川内市植木町比野104-1	運転回数	1223	点検 実施者	エムシー・サービス(株)黒木	
納入場所		サービス形態		受付 担当者		

ドア機能

- ✓ ドア開閉動作
- ✓ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ✓ ドアフックの掛かり・押付け強さ
- ✓ ドア締め付けスイッチの作動
- ✓ インターロックの作動
- ✓ デンションスプリングの取付け・伸び
- ✓ ドアパネルの取付け・キズ
- ✓ ドアヒンジの動作
- ✓ ドア手動開放レバーの作動
- ✓ ドア開放スイッチONの際の開放量

薬剤ポンプ(洗剤・仕上剤)

- ✓ 薬剤レベルセンサー配線・配管取付
- ✓ 薬剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ✓ ポンプチューブの潰れ・漏れ
- ✓ ローラーポンプの作動
- ✓ 薬剤投入量
- ✓ 薬剤レベルセンサーの作動

乾燥ユニット

- ✓ 乾燥ファンへの取付け
- ✓ 乾燥ファンの作動・異音
- ✓ 乾燥ヒーターの取付け状態・配線の劣化
- ✓ 乾燥ヒーターの作動
- ✓ プレフィルタのつまり・汚れ
- ✓ HEPAフィルタのつまり・汚れ

配管系

- ✓ 外部給水・給湯配管の継手・ホースの損傷・漏れ
- ✓ 外部排水継手・ホースの損傷・漏れ
- ✓ 給水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ✓ 排水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ✓ 循環回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ✓ 乾燥回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ✓ 給水弁の作動・漏れ
- ✓ 給湯弁の作動・漏れ
- ✓ 水位圧カススイッチの取付け・漏れ
- ✓ 給水タンク・凝縮タンクの取付け・漏れ

※

ポンプ

- ✓ 循環ポンプの取付け・漏れ
- ✓ 循環ポンプの作動・異音
- ✓ 防振ゴムの取付け・劣化
- ✓ 排水ポンプの取付け・漏れ
- ✓ 排水ポンプの作動・異音
- ✓ 凝縮排水ポンプの取付け・漏れ
- ✓ 凝縮排水ポンプの作動・異音

洗浄槽

- ✓ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れ
- ✓ 槽内LEDの点灯
- ✓ 洗浄アームの回転
- ✓ 洗浄アームの変形・損傷・つまり清掃
- ✓ ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ
- ✓ 排水ロフィルタの汚れ・詰まり
- ✓ 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ✓ ヒーター・過昇防止器の取付け・汚れ

電装系

- ✓ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ✓ ディスプレイの色あせ・表示
- ✓ 電源スイッチの作動
- ✓ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ✓ 各基板のコネクター緩み
- ✓ 端子の緩み・コネクターの接続
- ✓ メモリーカードへの書き込み確認
- ✓ 圧力センサーの取付け
- ✓ ヒーター配線の緩み・変色(加温・乾燥)

外装・設置

- ✓ 本体の水平確認・基準傾き内
- ✓ アジャスタフットの固定・ゴムシートの設置
- ✓ 外装の汚れ・損傷
- ✓ 制御パネルカバーの汚れ・損傷

消耗品の交換

- ✓ ドアパッキン
- ✓ プレフィルタ
- ✓ HEPAフィルタ
- ✓ 洗剤・仕上剤ポンプチューブ

性能評価

- ✓ インジケーターによる残渣判定(TOSI)

運転確認
合 ・ 否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品	数量
HEPAフィルタ	1
プレフィルタ	1
洗剤・仕上剤ポンプチューブ	1式
ドアパッキン	1式
ゴムパッキン	1
槽内フィルタ	1

※ホース部分より水漏れ有
バンド増し締めで対応

株式会社IHIAグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒804-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-8

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030