

小型 全自動洗浄消毒装置 WD-150簡易点検表

お客様	名称	いなみ矯正歯科 様	製造番号	14070115	点検実施日	2015年9月18日	ご承認印	
	住所	京都府宇治市広野町東裏62-1	運転回数	507 回	点検実施者	株式会社IHIシバウラ 小山 貴之		
	納入場所	同上	サービス形態	簡易点検	モリタ担当者	京都南営業所 梅原 様		

ドア機能

- ☒ 開閉動作確認
- ☒ ドアパッキン目視点検
- ☒ ドアフックの掛かり・締め付け量確認
- ☒ ドア締め付けスイッチ作動確認
- ☒ インターロック動作確認
- ☒ テンションスプリングの取付け状態・伸び
- ☒ ドアパネルの取付け状態・キズ
- ☒ ドアヒンジの動作
- ☒ ドア緊急時開放スイッチ機構確認
- ☒ ドア開放スイッチON時の開放状態

洗剤ポンプ

- ☒ 洗剤レベルセンサ配線、配管取付
- ☒ 洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ☒ ポンプチューブの潰れ・漏れ
- ☐ ローラーポンプの動作確認
- ☐ 流量計の検出状態
- ☐ 洗剤投入の確認
- ☐ 洗剤レベルセンサーの作動確認

乾燥ユニット

- ☐ 乾燥ファンの取り付け状態
- ☒ 乾燥ファンの作動状態・異音
- ☐ 乾燥ヒーターの取り付け状態・配線の劣化
- ☐ プレフィルターの汚れ
- ☐ メインフィルターの汚れ(HEPAフィルター)

配管系

- ☐ ストレーナーの清掃(給水・給湯)
- ☒ 外部給水・給湯配管の継手の損傷、漏れ
- ☒ 外部排水継ぎ手・ホースの漏れ
- ☒ 給水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 循環回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☐ 給水弁の作動状態・漏れ
- ☐ 給湯弁の作動状態・漏れ
- ☐ RO水弁の作動状態・漏れ
- ☐ 水位圧カスイッチ・センサーの取り付け状態・漏れ
- ☐ 給水タンクの取り付け状態・漏れ
- ☐ 排水タンクの取り付け状態・漏れ
- ☐ 凝縮期の取り付け状態・漏れ
- ☐ 乾燥エア回路逆支弁の作動状態・漏れ

ポンプ

- ☒ 循環ポンプの取り付け状態・漏れ
- ☒ 循環ポンプの作動状態・異音
- ☐ 防振ゴムの取り付け状態・劣化
- ☒ 排水ポンプの取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水ポンプの作動状態・異音

洗浄槽

- ☒ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れの有無
- ☒ 槽内LEDが各工程色で点灯している
- ☒ 洗浄アームの回転確認・ベアリング磨耗状態
- ☒ 洗浄アームの変形・損傷確認・つまり清掃
- ☒ ラック接続ゴムブッシュのへたり・漏れ
- ☒ 排水口フィルターの汚れ・詰まり
- ☐ 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ☐ ヒーター過昇防止器の取り付け状態・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☐ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☐ 各基板のコネクター緩み確認
- ☐ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☐ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☐ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☐ ヒーター配線の緩み・変色有無(加温・乾燥)

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

消耗品

- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☐ エアフィルター(プレ)のつまり・汚れ
- ☐ エアフィルター(メイン)のつまり・汚れ
- ☒ 洗剤ポンプチューブ

性能評価

- ☒ インジケーターによる残渣判定(TOSI)

運転確認

OK

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量



株式会社IHIシバウラ

機械事業本部営業部 営業サービスG

〒704-8122岡山県岡山市東区西大寺新地 70-6

TEL 086-944-6528 FAX086-942-9030