

器具除染用洗浄機 WD-150点検報告書

お客様用

お客様	名称 わかばデンタルクリニック 様	製造番号 14080145	点検実施日 2018 年2月13日	ご承認印 
	住所 京都府京田辺市山手東2-5-7	運転回数 2117	点検実施者 富田	
	納入場所 同上	サービス形態	モリタ担当部署 (株)モリタ 京都南営業所 様	

ドア機能

- ☒ 開閉動作確認
- ☒ ドアパッキン目視点検
- ☒ ドアフックの掛かり・締め付け量確認
- ☒ ドア締め付けスイッチ作動確認
- ☒ インターロック動作確認
- ☒ テンションスプリングの取付け状態・伸び
- ☒ ドアパネルの取付け状態・キズ
- ☒ ドアヒンジの動作
- ☒ ドア緊急時開放スイッチ機構確認
- ☒ ドア開放スイッチON時の開放状態

洗剤ポンプ

- ☒ 洗剤レベルセンサ配線、配管取付
- ☒ 洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ☒ ポンプチューブの潰れ・漏れ
- ☒ ローラーポンプの動作確認
- ☒ 流量計の検出状態
- ☒ 洗剤投入の確認
- ☒ 洗剤レベルセンサーの作動確認

乾燥ユニット

- ☒ 乾燥ファンの取り付け状態
- ☒ 乾燥ファンの作動状態・異音
- ☒ 乾燥ヒーターの取り付け状態・配線の劣化
- ☒ プレフィルターの汚れ
- ☒ メインフィルターの汚れ (HEPAフィルター)

配管系

- ☒ ストレーナーの清掃 (給水・給湯)
- ☒ 外部給水・給湯配管の継ぎ手の損傷、漏れ
- ☒ 外部排水継ぎ手・ホースの漏れ
- ☒ 給水回路配管 (ホース) の取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水回路配管 (ホース) の取り付け状態・漏れ
- ☒ 循環回路配管 (ホース) の取り付け状態・漏れ
- ☒ 給水弁の作動状態・漏れ
- ☒ 給湯弁の作動状態・漏れ
- ☒ RO水弁の作動状態・漏れ
- ☒ 水位圧カススイッチ・センサーの取り付け状態・漏れ
- ☒ 給水タンクの取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水タンクの取り付け状態・漏れ
- ☒ 凝縮期の取り付け状態・漏れ
- ☒ 乾燥エア回路逆支弁の作動状態・漏れ

ポンプ

- ☒ 循環ポンプの取り付け状態・漏れ
- ☒ 循環ポンプの作動状態・異音
- ☒ 防振ゴムの取り付け状態・劣化
- ☒ 排水ポンプの取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水ポンプの作動状態・異音

洗浄槽

- ☒ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れの有無
- ☒ 槽内LEDが各工程色で点灯している
- ☒ 洗浄アームの回転確認・ベアリング磨耗状態
- ☒ 洗浄アームの変形・損傷確認・つまり清掃
- ☒ ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ
- ☒ 排水口フィルターの汚れ・詰まり
- ☒ 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ☒ ヒーター過昇防止器の取り付け状態・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色有無 (加温・乾燥)
- ☒ SDカードの書き込み確認

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷


消耗品

- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアフィルター (プレ) のつまり・汚れ
- ☒ エアフィルター (メイン) のつまり・汚れ
- ☒ 洗剤ポンプチューブ

性能評価

- ☒ インジケーターによる残渣判定 (TOSI)

運転確認	
(合)	否

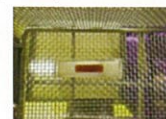

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
HEHAPフィルター	1
入口フィルター	1
扉パッキンL=1500	1
扉パッキンL=500	1
DPIチューブ (洗剤チューブ)	2

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒804-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030

修理報告書(お客様用)

管理 No.

発行日: 平成 29年 9月 27日

顧客名 (株)IHIシパウラ		ご担当		様		製品名 ウォッシャー・ディスプレイエクター		ユニット名				
(部署) わかばデンタルクリニック						型式名 WD-150		ユニット型				
所在地 〒		TEL				製造No.14080145		ユニットNo.				
販売店		様		受付 年 月 日		担当		納入 年 月 日				
店所名		様		完了 年 月 日		担当		保証期間 内□ 外□				
障害状況(症状・条件等を記載)						発生頻度 常時□ 頻発□						
・配管ゴムC(対策済品)破裂により水濡れ、センサブロックにも亀裂有り、水濡れ						時々□ 一度□						
修理見積 期日:10月6日(金)						再現せず□						
修理完了 期日:10月20日(金)						付属品 有り□ ()						
調査報告書 期日:10月20日(金)						無し□						
						添付資料 有り□ ()						
						無し☑						
修理内容(障害箇所・処置内容を記載)						障害分類		処置分類		点数		
障害状況を確認した。他に異常は見られなかった。												
配管ゴムC、排水センサブロックを交換。												
出荷検査実施、異常無し。												
安全性試験結果:異常無し												
交換部品名称及び定格			数	単価	小計	点検技術料		分類	¥			
7E+07	配管ゴムC 3MS-26479-1	1				施術料		点/H	¥			
7E+07	センサボックス 4MS-26271-3	1				出張料		点	¥			
						部品費		計	¥			
						梱包運送費		片道□ 往復□	¥			
						宿泊費			¥			
						諸経費			¥			
						合計金額		¥				
						有償□ 無償□		売上¥				
						売上票No.						
記事						上記金額には消費税が含まれていません。						
配管ゴムCが柔らかくなって劣化していました。油による劣化が考えられ、そのようなものを洗浄していないかご確認ください。												
品質管理欄					発行元 田中		修理時間 H					
					保守区分 保守点検		責任技術者		検査者		修理者	
					出張保守 □		北沢		森		小山	
					引取拠点 □		29.11.9		29.11.9		29.10.27	
					引取工場 □							

チヨダエレクトリック株式会社

・長野県千曲市八幡4601-3

TEL: 026-273-1818

・長野県千曲市新田 124

TEL: 026-273-1800

(帳票75B-4 1/2)