

点検・修理報告書

管理 No. 20181015
発行日: 2019 年 7 月 3 日

機種/型式	BC17				
作業年月日	2019 年 7 月 3 日			作業時間:	Hr
顧客名	弘部歯科医院 様			TEL:	
所在地	京都府久世郡久御山町藤和田村西7-1-1			ご担当	様
販売店				ご担当	様
納入年月日	2014 年 5 月 29 日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐				
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐				
装置情報	製造番号:	13090023	運転回数:	166	
不具合状況、依頼内容、異常履歴					
エラー 2 6 蒸気発生器低温異常					
原因					
・水ポンプ・給水タンクのゴミ詰まり ・排蒸弁の詰まり					
処置、作業内容					
・給水タンクの清掃 ・蒸気発生器温度センサーの交換 ・給水ポンプ・排蒸弁の交換					
特記事項					
製造元へ送り修理依頼をしていたため返却が遅くなりました。					
ご迷惑をお掛けしてしまい、大変申し訳ございませんでした。					
	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1			1		
2					
3					
4					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		
お客様ご確認署名欄					
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。					
2019 年 7 月 12 日					
ご署名					
修理業者			責任技術者	作業者	
株式会社IHIアグリテック			 富田	 安田	
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6					
TEL:086-944-6528					
FAX:086-942-9030					