

点検・修理報告書

管理 No. 20196672

発行日: 2019年 11月 6日

機種/型式	クラスBオートクレーブ BC-17		
作業年月日	2019 年 10 月 30 日		作業時間: Hr
顧客名	弘部歯科医院 様	TEL:	
所在地	京都府久世郡久御山町藤和田村西7-11		ご担当 様
販売店		ご担当 様	
納入年月日	2014 年 5 月 29 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☒ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 13090023	運転回数: 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
------	----------------	---------	--

不具合状況、依頼内容、異常履歴

滅菌物の乾燥状態が悪い

原因

再現していません。

処置、作業内容

乾燥工程のパルス数を4回から6回に変更

特記事項

適正な滅菌物の量を入れて滅菌して下さい

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 6 無償	部品代 合計	
				技術料	
				出張料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 01. 11月 -7 日

医療法人 弘部歯科医院
ご署名 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者
富田	安田
'19/10/29	'19/10/29