



## クラスBオートクレーブ IC Clave 設置報告書

お客様用

お客様	名前	鶴見大学附属病院障害者専科	製造番号	100157	確認  
	住所	神奈川県横浜市鶴見区鶴見2-1-3		納入検査実施日 2016.8.29	
	TEL	045-380-8543	納入検査実施者	エムシーサービス(株) 福島、小泉	

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目	
ドア・パッキン	✓	ハンドル開閉検出確認	電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ	
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	ディスプレイの色あせ・表示確認	
	✓	ドアパネル・ハンドルのキズ・汚れ		✓	電源スイッチの作動状態	
	✓	ハンドルキズ・汚れ		✓	SDカードの挿入・取外性	
缶体	✓	割れ・キズ・腐食・汚れの有無		✓	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと	
	✓	滅菌温度センサの汚れ		✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ	
	✓	棚、トレーのキズ・汚れ		✓	本体の水平確認 設置時ガタツキがないこと。	
	✓	缶内フィルタのキズ・汚れ・取外・取付性		✓	アジャスタフット・ナットの緩み・設置状態	
給水タンク	✓	給水タンクの内部汚れ	外装・設置	✓	キズ・汚れ	
	✓	水フィルタキズ・汚れ・取外・取付性		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷	
	✓	ゴム蓋の取付状態 機械室に水が入らない 蓋の取付取外しに問題が無いこと		✓	運転プログラムの確認(規定滅菌温度・時間)	
	✓	装置正面のコネクタからの排水ホース排水 コネクタ部からの水漏れ(無いこと)		✓	タッチパネル表示確認・履歴の確認	
	✓	LOW(水切)/High(満水)フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致		✓	B&Dテスト実施	
排水タンク	✓	タンク内に汚れはないか	性能評価	✓	リーケチェックテスト	
	✓	フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致		✓	0点調整	
	✓	装置正面のコネクタからの排水ホース排水 コネクタ部からの水漏れ(無いこと)		✓	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付	
スペース	✓	設置スペースの確保 右90×左50×背面75×天面250mm以上 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと	その他	✓	運転・お手入れ方法の説明	
				✓	装置内運転時異音	
特記事項						