

クラスBオートクレーブ IC Clave 点検報告書

お客様・(株)モリタ設・作業者・IHシバウラ

お客様	名称	大阪歯科大学附属病院	製造番号	100019	点検実施日	2016年11月24日	ご承認印
	住所	大阪府大阪市中央区大手前1-5-17	運転回数	588	点検実施者	(株)IHシバウラ	
	納入場所	7F	サービス形態	保守点検	モリタ担当部署	大阪歯科大学様	

ドア

- ☒ 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
- ☒ ドアカバーの取付け状態・割れ
- ☒ ドア開閉検知確認
- ☒ ドアロック作動・検知確認
- ☒ 蓋板のキズ・汚れ
- ☐

缶体

- ☒ 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- ☒ 缶内温度センサの汚れ
- ☒ トレー棚・減菌トレー(網バスケット)の破損・汚れ
- ☒ 缶内ストレーナーフィルターの損傷・汚れ

配管系

- ☒ フッ素樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ 給気弁の作動状態・漏れ
- ☒ 排蒸弁の作動状態・漏れ
- ☒ 真空弁の作動状態・漏れ
- ☒ 蒸気弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☒ 回水弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☒ 排気弁の作動状態・漏れ
- ☒ 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- ☒ 安全弁(缶体)の漏れ
- ☒ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ☒ 大気圧検知圧力センサーの作動状態・漏れ
- ☒ ラジエーターの取付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ☒ ソケット他溶接割れ・漏れ
- ☒ フランジパッキン漏れ
- ☒ ヒーター取付け状態・漏れ
- ☒ サーモスタット・温度センサ取付け状態
- ☒ 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- ☒ 逆止弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- ☒ 水漏れ・異常音の確認
- ☒ 真空到達度

給水タンク

- ☒ 給水タンクの損傷・漏れ
- ☒ 蓋の損傷・割れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

- ☒ タンクの汚れ・漏れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 省基板のコネクター緩み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色有無

外装・設置

- ☒ アジャスタフットの緩み
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- ☒ 運転プログラムの確認
- ☒ 大気圧ゼロ設定の確認

消耗品

- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアフィルターつまり・汚れ

性能評価

- ☒ B&Dテスト $P_1 = -84.2\%$ $P_1 \text{ 2min } 56$
- ☒ バキュームテスト $P_2 = -83.96$
- $P_3 = -83.69$



BMS-Test STEAM

運転確認

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
ドアパッキン	1
共振による異常音があり、対応しました。	
強化でオートベースによる共振を抑制	
テーパーリングによりカバーとのすき間を減らしました	



株式会社IHシバウラ

機械事業本部営業部 営業サービス課

〒704-8122 岡山県岡山市東区西天寺新地170-6

TEL: 086-944-8528

FAX: 086-942-9030