

IM-302

クラスBオートクレーブ BC-17点検報告書

モリタ用
作業者用
HHAグリテック用

お客様	名称 鶴見大学歯学部附属病院	製造番号 14080168	点検実施日 2018.2.6	ご承認印 
	住所 横浜市鶴見区鶴見2-1-3	運転回数 2615回	点検実施者 エム・サー・ビス(株) 金子	
	納入場所 3F 矯正科	サービス形態	モリタ担当部署	

計装(安全)

- ☒ 圧力計0点指示誤差

ドア

☒ フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認
☒ 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
☒ フック取付け状態・動作確認
☒ フックバネ・フック線番ピンの取り付け状態
☒ ビス・ナット・ホーローセット増し締め
☒ ドアカバーの取り付け状態・割れ
☒ フック検出ユニット作動確認
☒ ドアロックユニット作動確認
☒ 蓋板のキズ・汚れ
☒ 開閉ハンドルの損傷確認

缶体

☒ 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
☒ 減菌温度センサの汚れ
☒ 網カゴの破損、汚れ
☒ 缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系

☒ フッ素樹脂チューブ・継手の損傷、漏れ
☒ シリコンチューブ・継手の損傷、漏れ
☒ 給気弁の作動状態・漏れ
☒ 排蒸弁の作動状態・漏れ
☒ 真空・乾燥弁の作動状態・漏れ
☒ 減菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
☒ ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
☒ ストレーナーの汚れ
☒ 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
☒ 安全弁(減菌室)の漏れ
☒ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
☒ ダンプナーの漏れ・溶接割れ
☒ 大気圧検知圧力スイッチの作動状態・漏れ
☒ ラジエターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ☒ ソケット他溶接割れ・漏れ
- ☒ フランジ/パッキン漏れ
- ☒ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ☒ 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- ☒ 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- ☒ 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- ☒ 水漏れ・異常音の確認
☒ 真空到達度

給水タンク

- ☒ 給水タンクの損傷・漏れ
- ☒ 下部給水弁の漏れ
- ☒ 蓋・取っ手の損傷・割れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

- ☒ タンクの汚れ・濡れ
☒ フLOATスイッチの作動状態・汚れ

電装系

- | | |
|---|-------------------------|
| ✓ | タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ |
| ✓ | ディスプレイの色あせ・表示確認 |
| ✓ | 電源スイッチの作動状態 |
| ✓ | 行程表示LEDの点灯 |
| ✓ | 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ |
| ✓ | 各基板のコネクター緩み確認 |
| ✓ | 端子の緩み・コネクターの接続確認 |
| ✓ | 配線の変色・損傷有無・結束状態 |
| ✓ | 圧力センサーの取付け状態・入力確認 |
| ✓ | ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥) |

外装・設置

- ✓ 本体の水平確認・基準傾き内
- ✓ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ✓ キズ・汚れ
- ✓ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- | | |
|---|---------------------|
| ✓ | 運転プログラムの確認 |
| ✓ | 入力・出力確認 |
| ✓ | 試運転プログラムの実行・異常動作の有無 |

消耗品

- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアフィルターつまり、汚れ

性能評価

- ☒ B&Dテスト実施
- ☒ ケミカルインジケーターによる判定
- ☒ リークチェック
- ☒ キャリブレーションの実施(温度・圧力)

インジケータ貼り付け

運轉確認

☒ 合 ・ 否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
ドアパッキン	1

株式会社IH|アグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-8

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030