

クラスBオートクレーブ IC Clave点検報告書

お客様	名称	大阪歯科大学附属病院(8F)	製造番号	100011	点検 実施日	2019年8月1日	ご 承 認 印	友成
	住所	大阪府大阪市中央区大手前1-5-17 8F	運転回数	1663 367回	点検 実施者	IAT 深井・宮下		
	納入場所		サービス形態	定期保守点検契約	モリタ 担当者	友成様		

計装(安全)

☒ 圧力計0点指示誤差

ドア

☒ フック検出スイッチの取り付け状態・動作確認☒ 開閉ハンドル取付け状態・動作確認☒ フック取付け状態・動作確認☒ フックパネ・フック線番ピンの取り付け状態☒ ビス・ナット・ホーローセット増し締め☒ ドアカバーの取り付け状態・割れ☒ フック検出ユニット動作確認☒ ドアロックユニット動作確認☒ 蓋板のキズ・汚れ

缶体

☒ 割れ・キズ・腐食・汚れの有無☒ 滅菌温度センサの汚れ☒ トレー棚・滅菌トレー(網バスケット)の破損・汚れ☒ 缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系

☒ フッ素樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ☒ シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ☒ 給気弁の作動状態・漏れ☒ 排蒸弁の作動状態・漏れ☒ 真空・乾燥弁の作動状態・漏れ☒ 滅菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)☒ ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)☒ ストレーナーの汚れ☒ 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損☒ 安全弁(滅菌室)の漏れ☒ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ☒ ダンプナーの漏れ・溶接割れ☒ 大気圧検知圧カスイッチの作動状態・漏れ☒ ラジエターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

☒ ソケット他溶接割れ・漏れ☒ フランジパッキン漏れ☒ ヒーター取り付け状態・漏れ☒ 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態☒ 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ☒ 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

☒ 水漏れ・異常音の確認☒ 真空到達度

給水タンク

☒ 給水タンクの損傷・漏れ☒ 下部給水弁の漏れ☒ 蓋・取っ手の損傷・割れ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

☒ タンクの汚れ・漏れ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認☒ 電源スイッチの作動状態☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ☒ 各基板のコネクター緩み確認☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認☒ ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

☒ 本体の水平確認・基準傾き内☒ アジャスタフットの緩み・設置状態☒ キズ・汚れ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

☒ 運転プログラムの確認 TK-02.10.T3☒ 入力・出力確認

消耗品

☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ☒ エアフィルターのつまり・汚れ

性能評価

☒ B&Dテスト実施☒ ケミカルインジケータによる判定☒ リークチェック☒ キャリブレーションの実施(温度・圧力)

運転確認

合	否
---	---

【     】

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品	数量
ドアパッキン交換	1

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030