

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2020 年 3 月 3 日

機種/型式	クラスBオートクレープ BC-17		
作業年月日	2020 年 2 月 17 日		作業時間： Hr
顧客名	しのぎ歯科医院 様	TEL： 03-3829-6480	
所在地	東京都墨田区東駒形 3-5-14		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014 年 4 月 3 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 13100043	運転回数： 3675/6451	運転回数リセット： ☒ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・エラー30 缶体真空異常			
原因			
・真空ポンプ劣化		給水ポンプ内 フィルター異物詰まり	排蒸弁フィルター 異物詰まり
・給水タンクの汚れ及び給水ポンプ内フィルター汚れ・排蒸フィルター汚れ			
処置、作業内容			
・真空ポンプ交換			
・定期メンテナンス実施、運転確認給水タンク・排水タンク・水ポンプ・排蒸弁フィルター清掃、各種調整			
特記事項			
・運転確認中エラー87 真空ポンプの老朽劣化により真空時間が伸び高温になる → 真空ポンプ交換			

交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1 真空ポンプ		1		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
☒ 1. 有償 ☐ 2. 無償		部品代 合計		
		技術料		
		出張料		
		合計		※定期メンテナンスに含む

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2020年 3 月 4 日

ご署名 篠山 謙二 印

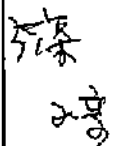
修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
環境PJ部 '20/02/26 菊池	環境PJサービス '20/02/19 富田	環境PJサービス '20/02/19 安田

クラスBオートクレーブ BC-17点検報告書

モリタ
作業専用
IHアグリテック用

お客様	名称	しのぎ歯科医院 様	製造番号	14100043	点検実施日	2020年2月17日	ご承認印	
	住所	東京都墨田区東駒形3-5-14	電話番号	3875/8589	点検実施者	IHIアグリテック 安田		
	納入場所		サービス形態	スポットメンテナンス	モリタ東京本社			

針装(安全)

- ☒ 圧力計0点指示誤差
- ドア
- ☒ フック検出スイッチの取り付け状態・動作確認
- ☒ 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
- ☒ フック取付け状態・動作確認
- ☒ フックバネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
- ☒ ピス・ナット・ホーローセット増し締め
- ☒ ドアカバーの取り付け状態・割れ
- ☒ フック検出ユニット動作確認
- ☒ ドアロックユニット動作確認
- ☒ 蓋板のキズ・汚れ
- ☒ 開閉ハンドルの損傷確認

缶体

- ☒ 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- ☒ 減圧温度センサの汚れ
- ☒ 網カゴの破損・汚れ
- ☒ 缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系

- ☒ フッ素樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ 給気弁の作動状態・漏れ
- ☒ 排気弁の作動状態・漏れ
- ☒ 真空・乾燥弁の作動状態・漏れ
- ☒ 減圧弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ストレーナーの汚れ
- ☒ 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- ☒ 安全弁(減圧室)の漏れ
- ☒ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ☒ ダンプナーの漏れ・接続割れ
- ☒ 大気圧検知圧カスイッチの作動状態・漏れ
- ☒ ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ☒ ソケット他溶接割れ・漏れ
- ☒ フランジパッキン漏れ
- ☒ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ☒ 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- ☒ 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- ☒ 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- ☒ 水漏れ・異常音の確認
- ☒ 真空到達度

給水タンク

- ☒ 給水タンクの損傷・漏れ
- ☒ 下部給水弁の漏れ
- ☒ 蓋・取っ手の損傷・割れ
- ☒フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

- ☒ タンクの汚れ・漏れ
- ☒フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- ☒ 運転プログラムの確認
- ☒ 入力・出力確認
- ☒ 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアフィルターのみ取り、汚れ

性能評価

- ☒ ケミカル・インジケータによる判定
- ☒ リークチェック

インジケータ貼り付け

【  】

運転確認

合 ・ 否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
・ドアパッキン	1
・真空ポンプ	1

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030