

クラスBオートクレーブ IC Clave点検報告書

お客様様	名称	大阪歯科大学附属病院(6F)	製造番号	100018	点検実施日	2020年11月10日	承認印	
	住所	大阪府大阪市中央区大手前1-5-17 6F	運転回数	2568	点検実施者	IAT 三宅		
	納入場所		サービス形態		モリタ担当者			

計装(安全)

- レ 圧力計ゼロ設定

ドア

- | | |
|---|---------------|
| レ | ブラケットの溶接状況確認 |
| レ | ドアカバーのねじ緩みの確認 |
| レ | ドアセンサ作動確認 |
| レ | ドアロックセンサ作動確認 |
| レ | ドアロックピンの動きの確認 |
| レ | 内蓋のキズ・汚れ |
| レ | 運転中のドアからの水漏れ |

缶体

- | | |
|---|--------------------------|
| レ | 割れ・キズ・腐食・汚れの有無 |
| レ | 缶内温度センサの汚れ |
| レ | トレー棚・滅菌トレー(網バスケット)の破損・汚れ |
| レ | 缶内フィルタの損傷・汚れ |

配管系

- レ テフロンチューブ・継手の損傷、漏れ
- レ シリコンチューブ・継手の損傷、漏れ
- レ 給気弁の動作確認
- レ 排蒸弁の動作確認
- レ 真空・排気弁の動作確認
- レ 蒸気弁の動作確認(3方弁)
- レ 回水弁の動作確認(3方弁)
- レ 排水コネクタの漏れ・破損
- レ 安全弁(缶内)の漏れ
- レ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- レ ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- レ ソケット他溶接割れ・漏れ
- レ 蒸気発生器からの漏れ
- レ ヒーター取り付け状態・漏れ
- レ サーモスタットの設定温度確認
- レ 給水ポンプの作動状態・異音・漏れ

真空ポンプ

- レ 真空到達速度(P1)の確認

給水タンク

- | | |
|---|-------------------|
| レ | 給水タンクの損傷・漏れ |
| レ | シリコンチューブの折れ、裂けの確認 |
| レ | 釜の損傷・割れ |
| レ | フロートセンサー(L)の作動確認 |
| レ | フロートセンサー(H)の作動確認 |

排水タンク

- レ タンクの汚れ・漏れ
- レ フロートスイッチの作動確認

電装系

- | | |
|---|--------------------|
| レ | タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ |
| レ | ディスプレイの色あせ・表示確認 |
| レ | 電源スイッチの作動状態 |
| レ | 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ |
| レ | 各基板のコネクター緩み確認 |
| レ | 端子の緩み・コネクターの接続確認 |
| レ | 配線の変色・損傷有無・結束状態 |
| レ | 圧力センサーの取付け状態 |
| レ | SD基板の腐食の確認 |

外装・設置

- | | |
|---|-------------------|
| レ | 設置場所の水平確認 |
| レ | 本体のフロント側が高いことの確認 |
| レ | アジャスタの緩み・破損の確認 |
| レ | 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷 |

制御

- | | |
|---|----------------------------|
| レ | 運転プログラムのVerの確認および最新Verへの更新 |
| レ | SDカードへの書き込みの確認 |

消耗品

- | | | |
|---|---------------------------|--|
| レ | ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ | |
| レ | エアーフィルターのつまり、汚れ ※(使用回数 回) | |

性能評価

- | | |
|---|-----------------|
| レ | B&Dテスト実施 |
| レ | コンパクトPCDによる判定 |
| レ | TESTバキューム |
| レ | 温度センサーの調整(VR調整) |

運転確認

☒ 合 ☐ 否

インジケータ貼り付け

[illegible]

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品	数量

株式会社IHアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX: 086-942-9030