

クラスBオートクレーブ INC Clave
設置報告書・納品検査記録表

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 営業グループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺

新地170番6

TEL(086)944-6528 FAX(086)942-9030



顧客情報	施設名称:	医療法人 巨龍会 町田病院 様	納入情報	製造番号:	200003
	所在地:	高知県高知市旭町1丁目104番地		納品設置日:	2020.4.22 (水)
	ご連絡先:	088-872-0164		納入検査担当者:	IAT 中村

1. 外観検査

項目	OK	NG	コメント
- 設置スペースは確保されているか (右90mm, 左50mm, 後75mm, 上250mm 以上)	☒	☐	
- メーカー規定の電源が用意されているか (単相 AC200V 15A)	☒	☐	
- 本体・付属品に不備がないか	☒	☐	
- 設置時にガタつきがないか	☒	☐	

2. 動作・運転確認

項目	OK	NG	コメント
- ドア開閉時に異常がないか	☒	☐	
- 給水タンクLOWセンサーが正常に作動するか	☒	☐	
- 給水タンクHIGHセンサーが正常に作動するか	☒	☐	
- 排水タンクHIGHセンサーが正常に作動するか	☒	☐	
- 圧力ゼロ設定を実施したか	☒	☐	
- バキュームテスト運転	☒	☐	T1. 2:13 / -81.07kPa T2. 7:14 / -80.86kPa T3. 17:45 / -80.79kPa
- 134℃ 乾燥運転	☒	☐	※乾燥工程中に手動停止
- 運転時間は適切であったか(60分以内)	☒	☐	
- C-PCDが全て黄→黒に変色したか	☒	☐	<インジケータ貼付欄>  BMS-Test
- 給水タンク内の排水をおこなったか	☒	☐	
- 排水タンク内の排水をおこなったか	☒	☐	※排水確認実施

☒ 納入設置完了しました。☒ 取扱いについて説明をおこないました。☒ メンテナンスについて説明をおこないました。

※設置時に実施済

<設定時間変更>

・134℃ LONG → 乾燥時間 30分

令和2年 4月 22日

高知市旭町1丁目104番地

医療法人 巨龍会 町田病院

ご署名欄

電話 088-872-0164

西岡 康子