

クラスBオートクレーブ INC Clave
設置報告書・納品検査記録表

株式会社IHIアグリテック
環境プロジェクト部 営業グループ
〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺
新地170番6
TEL(086)944-6528 FAX(086)942-9030



顧客情報	施設名称:	大里眼科クリニック 様	納入情報	製造番号:	200010
	所在地:	福岡県北九州市門司区柳町1-2-26 Tskビル2F (設置:3F)		納品設置日:	2020-10-08(月)
	ご連絡先:	093-371-4577		納入検査担当者:	(株)IHIアグリテック 中村

1. 外観検査

項目	OK	NG	コメント
- 設置スペースは確保されているか (右90mm, 左50mm, 後75mm, 上250mm 以上)	☒	☐	
- メーカー規定の電源が用意されているか (単相 AC200V 15A)	☒	☐	
- 本体・付属品に不備がないか	☒	☐	
- 設置時にガタつきがないか	☒	☐	

2. 動作・運転確認

項目	OK	NG	コメント
- ドア開閉時に異常がないか	☒	☐	
- 給水タンクLOWセンサーが正常に作動するか	☒	☐	
- 給水タンクHIGHセンサーが正常に作動するか	☒	☐	
- 排水タンクHIGHセンサーが正常に作動するか	☒	☐	
- 圧力ゼロ設定を実施したか	☒	☐	
- バキュームテスト運転	☒	☐	
2) 乾燥運転	☒	☐	$T_1 = 2.14 (-80.93 \text{ kPa})$ $T_2 = -80.72 \text{ kPa}$ $T_3 = -80.72 \text{ kPa}$ $61 \text{ min } 40 \text{ sec}$ 122.9°C 121.0 kPa
- 運転時間は適切であったか(60分以内)	☒	☐	
- C-PCDが全て黄→黒に変色したか	☒	☐	BMS-Test STEAM
- 給水タンク内の排水をおこなったか	☒	☐	
- 排水タンク内の排水をおこなったか	☒	☐	

- ☒ 納入設置完了しました。
☒ 取扱いについて説明をおこないました。
☒ メンテナンスについて説明をおこないました。

2020年 10月 8日

〒800-0025 北九州市門司区柳町1丁目2-26
 代表者 大里眼科クリニック
 辰 巳 和 弘
 TEL093(371)4577

ご署名欄