

点検・修理報告書

管理 No. 210XXX
発行日: 2021年11月10日

IC Clave	
作業年月日	2021年11月9日 作業時間: 8 Hr
顧客名	古川眼科医院 様 TEL:
所在地	山梨県山梨市小原西196-2 ご担当 様
販売店	株式会社イナミ ご担当 様
納入年月日	2020 年 12 月 11 日 保証期間 内 ☒ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 200008	運転回数: 76回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・主電源をONにしてもタッチパネルが反応しない。		
原因		
・工場では再現しませんでした。		
・タッチパネルが反応しない原因は、制御基板とタッチパネルの間の通信不良です。通信不良の原因としては、 ①ケーブルの接続不良 ②通信ラインへのノイズの侵入が考えられます。		
処置、作業内容		
①ケーブルは確実に接続されておりました。		
②主電源をONしたときに、同時に負荷がONしたタイミングで発生するサージ電圧の影響が考えられますので、 ケーブルに侵入するノイズレベルを低減する対策を実施いたしました。		
特記事項		
・蒸気弁と回水弁を交換いたしました。		
・最新のバージョンにバージョンアップいたしました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気弁		1		
2	回水弁		1		
3					
4					
5					
6					
7					

1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
	技 術 料	
	出 張 料	
	合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

古川明博

修理業者 株式会社 I H I 物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	三宅
21/11/10	21/11/10	21/11/10